

**NEGATIVNÍ:** V kontrolní části (C) se objeví pouze jedna červená čára a v testovací oblasti (T) žádná čára. Negativní výsledek naznačuje, že ve vzorku nejsou žádné nové částice koronaviru nebo je počet virových částic pod detekovatelným rozsahem.

**NEPLATNÝ:** V kontrolní oblasti (C) se neobjeví žádná červená čára. Test je neplatný, i když je v testovací oblasti (T) čára. Nejpravděpodobnějším důvodem selhání kontrolní linky je nedostatečný objem vzorku nebo nesprávné procedurální techniky. Zkontrolujte postup testu a opakujte test s novým testovacím zařízením. Pokud problém přetrvává, okamžitě přestaňte testovací soupravu používat a kontaktujte svého distributora.



HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.  
4th Floor, 12 Building, Eastern Medicine Town,  
Xiaoha Economic & Technology Development,  
310018 Hangzhou, Zhejiang, P.R. China

Číslo: 1101431601  
Verze: 1.3  
Datum: 2021-01-14

## Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test Device (saliva)

### Test COVID-19 (ze slin)

#### Návod k použití

Před testováním nechte testovací sadu stabilizovat na pokojovou teplotu (15 - 30°C). Po dobu nejméně 10 minut před odběrem vzorku slin nevkádejte do úst nic, včetně jídla, pití, žvýkačky, tabáku, vody a ústní vody.


Sliny mohou být sbírány sběračem slin nebo kalíškem/sáčkem na sliny.

#### Při použití kalíšku/sáčku na sliny:


1. Vyplňte dostatek slin do sběrného kalíšku/sáčku na sliny.




2. Kapátkem odeberte z kalíšku/sáčku sliny.

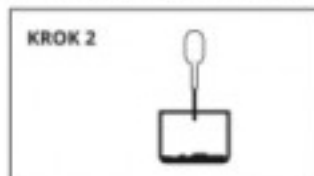


3. Vyměňte extrakční zkumavku a přeneste 4 kapky slin do extrakční zkumavky.

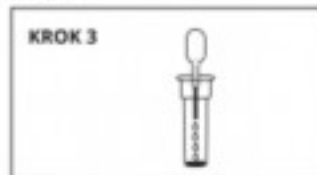

4. Vyměňte lahvičku extrakčního pufru, odloňte vrchní část lahvičky s extrakčním pufrem a přidejte veškerý extrakční pufr do extrakční zkumavky.

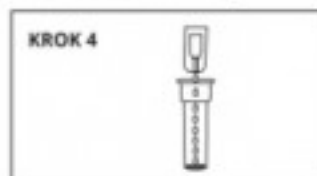


5. Vytáhněte kapátko a uzavřete jím extrakční zkumavku, jemně ji cca 5 sekund vertikálně protřepávejte, abyste sliny dobře promíchaly s extrakčním pufrem.

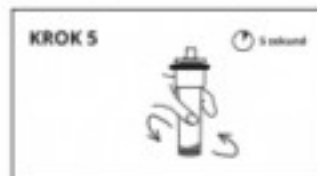

Použitý kalíšek/sáček přeložte na polovinu a zlikvidujte do plastového sáčku jako lékařský odpad v souladu s místními předpisy.

#### Když je vzorek připraven, proveďte následující kroky k dokončení testu:

1. Vyměňte testovací zařízení z uzavřeného fóliového sáčku. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud se test provede ihned po otevření fóliového sáčku. Položte testovací zařízení na čistý a rovný povrch.
2. Přeneste 3 kapky vzorku do vzorkovací jamky testovacího zařízení svisle, spusťte časovač.
3. Výsledek odečtěte během 10-20 minut. Výsledek po 20 minutách neinterpretujte.

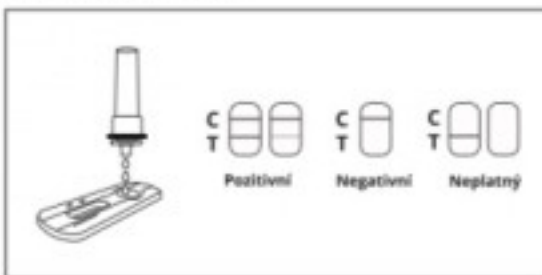

#### INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

(viz výše uvedený příklad)

**POZITIVNÍ:** Objeví se dvě červené čáry. Jedna červená čára se objeví v kontrolní oblasti (C) a jedna červená čára v testovací oblasti (T). Odstín barvy se může lišit, ale měl by být považován za pozitivní, kdykoli existuje jen slabá čára.